

BabyBalance

LED智能嬰兒數位體重計

通用使用說明書



本產品針對符合以下條件之所設計
使用時務必遵守下列限制：

最大體重
20kg

- 安裝及使用本產品前請詳閱本說明書
- 請將本說明書妥善保管於使用說明書收納袋
- 請確實按照本說明書指示方法操作本產品

lionelo.com.tw

校正方法

●自行校正

1. 請先備妥 2Kg *1、5Kg *3 之砝碼。
2. 按電源開關開啟秤，當面板顯示HI時，短按Unit鍵3次，再長按Unit鍵至顯示數字時放開。
3. 當面板顯示2.000Kg並閃爍時，請放上2Kg砝碼。
4. 當面板顯示5.000Kg並閃爍時，請放上5Kg砝碼。
5. 當面板顯示10.000Kg並閃爍時，請放上10Kg(5+5)砝碼。
6. 當面板顯示15.000Kg並閃爍時，請放上15Kg(5+5+5)砝碼。
7. 顯示PASS後，即校準完成。

●送回原廠付費校正

請將產品自行送回本公司維修中心，或裝箱包裝後委請物流代送。
單次校正工本費，請依網站公告

清潔保養

請以柔軟的濕布清潔擦拭本產品。請勿使用具有腐蝕性的清潔劑。

保證書


〈僅適用台灣地區〉

產品	BabyBalance		
貨號		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商 確認章	(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)		

保固事宜相關說明請參閱Lionelo官網

委製商
BrandLine Group Sp. z o. o.
地址：ul. A. Kreglewskiego 1, 61-248 Poznan, Poland
電話：+48-61-222-2979

台灣總代理/進口商
國翔貿易股份有限公司
地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓
電話：(03)551-0131
維修專線：(03)551-0916
統一編號：83064248
客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

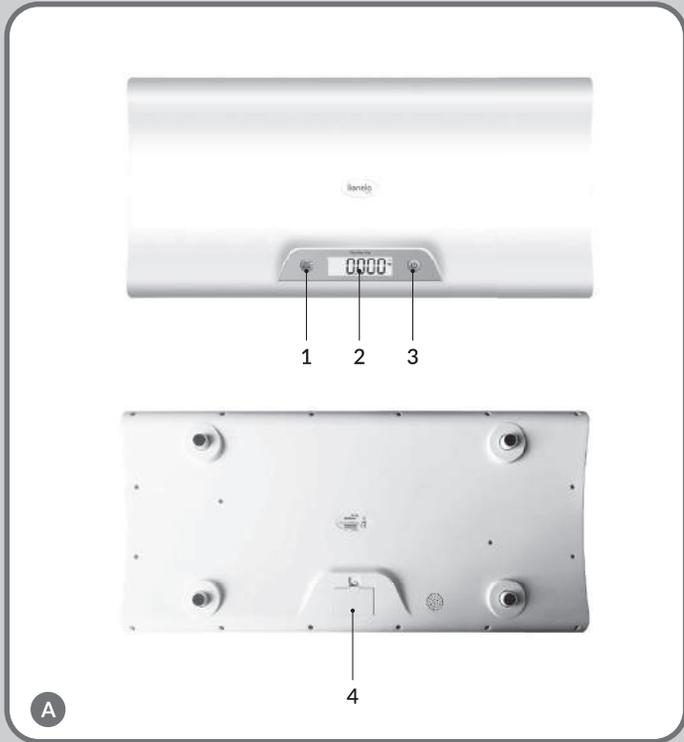

※圖片僅供參考。產品的實際設計可能與所展示的圖片有所不同。

感謝您購買本產品。

如果您對產品有任何意見或疑問，請隨時聯繫我們：

台灣總代理/進口商

國翔貿易股份有限公司

地 址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電 話：(03)551-0131

客服信箱：Service@kouh-san.com.tw

維修專線：(03)551-0916

統一編號：83064248

在您首次使用之前，請仔細閱讀本操作手冊。

重要！ 請保留此說明書以供日後參考

在開始使用產品之前，請仔細閱讀本手冊。錯誤的使用可能會對兒童的健康及安全構成威脅。

警告！

1. 使用前，請仔細閱讀本使用說明書並妥善保存以供日後參考。
2. 本產品僅供測量嬰兒體重使用。
3. 本產品僅供家庭使用，不可用於醫療或商業用途。
4. 本產品僅限使用於指定用途，並應遵循本說明書。
5. 代理商對因誤用本產品而造成的任何損失或損壞不承擔任何責任。
6. 嬰幼兒最大測量重量不得超過20公斤(44.09磅)。請勿超過最大重量，超過時將可能導致產品損壞。
7. 將嬰幼兒放在秤上之前，請確保將體重計放置在平坦、水平且穩定的表面上後再行使用。
8. 請勿在無人看管嬰幼兒的狀態下使用本產品時。
9. 請定期檢查本體重計是否損壞或磨損。若發現損壞時請勿繼續使用。
10. 如果發生損壞，請聯絡代理商服務中心。請勿自行改裝或修理設備。
11. 如果您對體重計或嬰幼兒的健康有任何疑問，請諮詢專業醫生。

電池警告！

1. 請將電池放置在嬰幼兒接觸不到的地方。
2. 請將乾電池正確依照電池大小、正負極（+/-）和標記安裝。
3. 請務必使用電壓值為1.5V的乾電池，以確保設備正常運作。
4. 請勿將電池投入火中，以免產生爆炸危險。
5. 如果長時間不使用本產品，請將乾電池取出。
6. 長期不使用本產品時請將乾電池取出，產品中殘留的乾電池過久可能會漏液或爆炸並損壞產品。
7. 請勿對非可充電的電池進行充電。
8. 請勿將不同種類的電池或舊電池與新電池混合使用。
9. 除乾電池外，請勿以其他供電來源接電使用。
10. 乾電池耗盡後，請依照規定分類回收。

液晶面板（圖 A）

1. 切換重量單位 / 記憶功能按鈕
2. LED重量顯示螢幕
3. 電源開關 / 扣重 / 手動測量鎖定
4. 乾電池盒

安裝電池

1. 確認本體重計已關閉（若要更換電池時）。
2. 將體重計翻轉至底部並打開電池盒蓋（圖A的4）。
3. 依照正確的正負極（+/-）標記裝入二顆3號乾電池。
4. 關閉隔間電池盒蓋。
5. 打開電源開關確認是否正常通電。

使用方法

1. 將本產品放置在平坦、水平且穩定的表面上。按下電源開關（圖A的3）。

使用方法

1. 將本產品放置在平坦、水平且穩定的表面上。按下電源開關（圖A的3）。
2. 當LED重量顯示螢幕（圖A中的2）顯示0.00時，即可開始使用。
3. 將嬰幼兒小心地放在體重計上。LED重量顯示螢幕將顯示重量並閃爍三下，測量值自動鎖定並算出。
4. 若要手動鎖定測量，請按住手動鎖定按鈕（圖A中的3）。
5. 鎖定後測量值將顯示25秒。將嬰幼兒從秤台上抱離後，重量仍持續顯示。
6. 按住開關（圖A中的3）可關機。未關機時，體重計將在約25秒後自動關閉。

選擇重量單位

按重量單位切換按鈕（圖A中的1）可變更顯示的重量單位。可選擇的重量單位有公克(g)、公斤(kg)、英鎊(lb)、英石鎊(st:lb)等四種選擇。

自動扣重功能 - 使用相重功能

1. 開啟電源（請參閱使用方法）。將想扣除的物體（如墊子）放在體重計上的秤台，設備將顯示該物體的重量。
2. 按下扣重按鈕（圖A中的3）。等到螢幕顯示值出現0.00後，將嬰幼兒放在秤台上。螢幕將顯示扣除了物體（如墊子）的重量。

記憶功能

本產品具有內建記憶功能，可顯示上一次測量時的數據。

1. 請先確保秤台上沒有任何物體。
2. 按住記憶功能按鈕（圖A中的1）即可自動顯示上一次測量時的數據。